

Otribebe®

OTRİBEBE NAZAL ASPİRATÖR

Otribebe Nazal Aspiratör ürününü kullanmadan önce lütfen talimatları dikkatlice okuyunuz.

1. OTRİBEBE NAZAL ASPİRATÖR NEDİR?

Nazal aspirasyon, bebeğinizin burun tıkanıklığında, özellikle bebeğinizi beslemeden önce gereken sıklıkta önerilmektedir. OTRİBEBE nazal aspiratör, rahatsız edici burun salgılarını burundan nazikçe uzaklaştırarak çocuğunuzun burnunun temizlenmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. OTRİBEBE aspiratör hijyen sağlayan absorban bir filtre içermektedir. Ergonomiktir ve yumuşak uçları sayesinde daha iyi kullanım sağlar. OTRİBEBE nazal aspiratör yumuşak uçları, mükemmel ve güvenli tasarımı sayesinde bebeğinizin burnu için naziktir. OTRİBEBE nazal aspiratör ile birlikte 2 adet tek kullanımlık uç bebeğinizin burnuna mükemmel uyum sağlar. Tek kullanımlık yedek uçlar 10'lu ambalajlar halinde de mevcuttur.

Kolay, güvenli ve hijyenik bir kullanıma sahip olan OTRİBEBE nazal aspiratör, bebeğinizin normal şekilde nefes almasına, yemek yemesine ve uyumasına yardımcı olur ve daha iyi hissetmesini sağlar.

Burun salgılarının burundan uzaklaştırılması kulak enfeksiyonları (otitis), sinüs enfeksiyonları (sinüzit) ya da öksürük gibi komplikasyonların da önlenmesine yardımcı olmaktadır.

OTRİBEBE nazal aspiratörü, bir serum fizyolojik ya da deniz suyu çözeltisinden (OTRİBEBE Monodoz) sonra kullanabilirsiniz. Bu çözeltiler, burun salgılarının çocuğunuzun burnundan uzaklaştırılmasını kolaylaştıracak ve burnunu açacaktır.

Yenidoğan bebekler, küçük çocuklar ve çocuklar için uygundur. Bununla birlikte, yenidoğanlarda medikal gözetim altında kullanılmalıdır.

OTRİBEBE nazal aspiratör ve yedek uçlarını bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık (alerji) durumunda kullanmayınız.


Hijyenik nedenlerle, kontaminasyonu engellemek amacıyla, aspiratör uçları tek kullanımlıktır. Kullanımdan sonra değiştirilebilir ucu atınız.

Bu ürünle ilgili sorularınız varsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

2. OTRİBEBE NAZAL ASPİRATÖR NASIL KULLANILIR?

1. Bir değiştirilebilir ucu (A) aspiratörün orta kısmına (B) yerleştiriniz.
2. Ağızlığı (C) ağızınıza (ebeveyn, bakıcı) yerleştirin ve aspiratörün ucunu (A) çocuğunuzun burun deliğine yerleştiriniz.

3. Ağızlık (C) kısmını kullanarak yavaş ve düzenli bir şekilde içinize çekiniz (aspirasyon).
4. Eğer aspiratör ucu iki aspirasyon sırasında dolarsa, ağızlık yoluyla hava üfleyerek salgıları emme başlığından bir mendile boşaltınız ya da ucu değiştiriniz.
5. Aynı işlemi diğer burun deliği için de uygulayınız.
6. Kullanımdan sonra değiştirilebilir ucu (A) çıkarınız ve atınız.

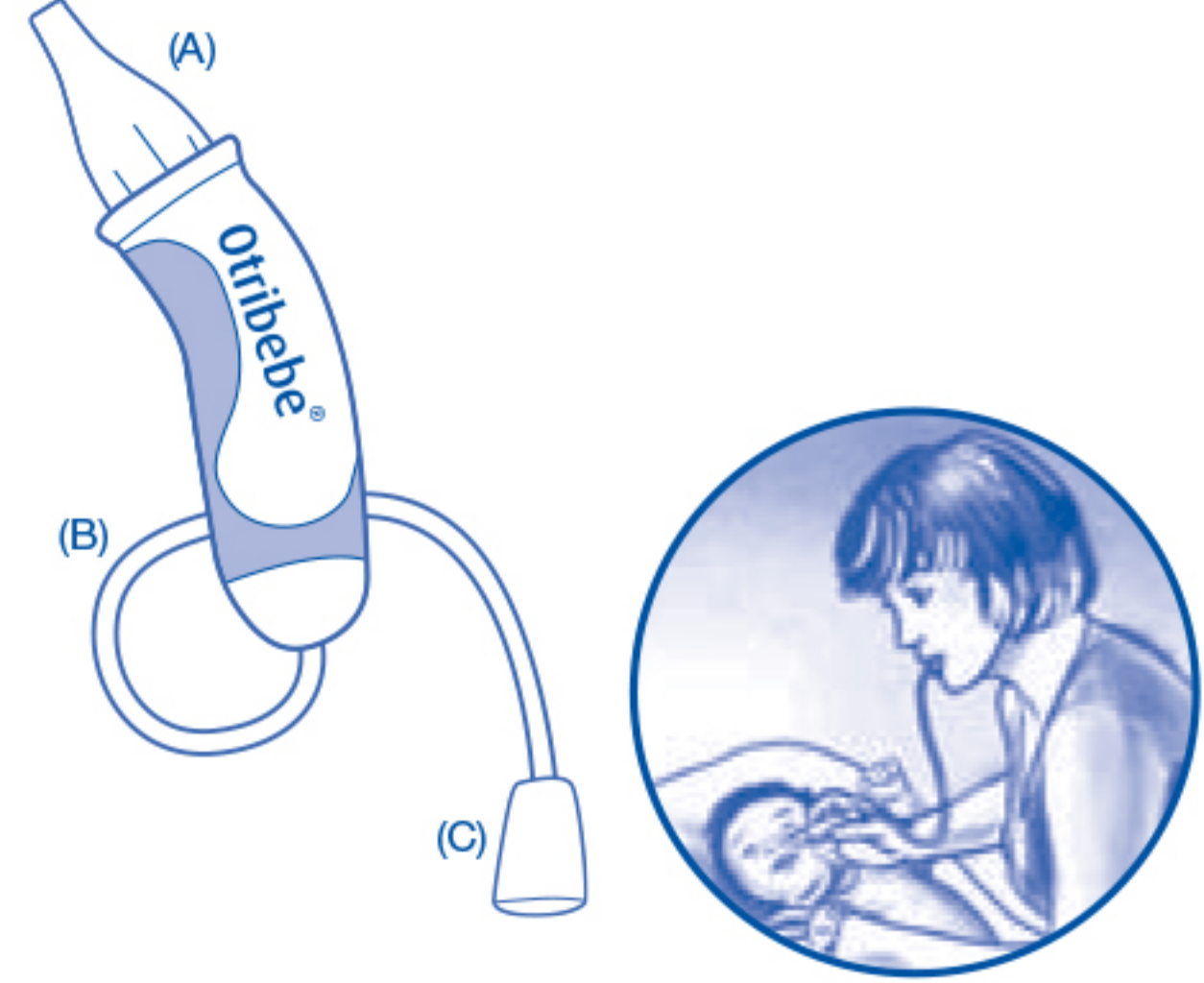

3. OTRİBEBE NAZAL ASPİRATÖR SAKLAMA KOŞULLARI

OTRİBEBE nazal aspiratörü çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Sıcaktan koruyunuz.

Etiketini veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra OTRİBEBE Nazal Aspiratör'ü ve Yedek Uçları kullanmayınız.

Kırılmış ya da hasarlı ürünü kullanmayınız.

4. DİĞER BİLGİLER

Bileşimi:

Aspiratör: polipropilen, stiren etilenbutilen stiren, silikon

Yedek uçlar: PVC ve melamin köpük

İçerik:

1 nazal aspiratör ve 2 tek kullanımlık yedek uç orijinal ambalajında

Tek kullanımlık yedek uçlar 10 tek kullanımlık yedek uç kutularında

Üretici: Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, CH-1260 Nyon, İsviçre.

STI Plastics, Fransa'da üretilmiştir.

İthalatçı firma:

GlaxoSmithKline Tüketici Sağlığı A.Ş. Büyükdere Cad.No:173 1.Levent Plaza B Blok 34394 Levent-Şişli/İstanbul

Soru ve görüşleriniz için: 444 4 083 tuketicisagligi@gsk.com



Tıbbi Cihaz

TR 940372



05N0036 / 000130

05N0036 / 000130