

Otribebe®

Monodoz

İzotonik ve Steril %100 Deniz Suyu

Otribebe Monodoz ürününü kullanmadan önce lütfen talimatları dikkatlice okuyunuz. Herhangi bir şüpheniz varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

1. Otribebe Monodoz nedir?

Bebeğin burun deliklerinin yıkanması için izotonik ve steril %100 deniz suyudur. Otribebe'nin tuz içeriği, burun mukozası ile uyumludur. Otribebe, deniz suyunun faydalı olan bütün mineral ve oligoelementlerini muhafaza eden, çözünmemiş ve koruyucu katkı maddeleri içermeyen %100 izotonik deniz suyudur.

Otribebe Monodoz flakon, bebeğinizin hassas burnu için uygun boyut ve şekildedir. Her biri 5 ml'lik tamamen steril 5 ve 20 tek kullanımlık ambalajlarda sunulmaktadır.

2. Otribebe Monodoz ne için kullanılır?

- Aşağıdaki durumlarda, burun tıkanıklığını gidermeye yardımcı olur ve burnu temizler:

Soğuk algınlığı: Soğuk algınlığı durumunda aşırı burun akıntısının giderilmesine yardımcı olur. Özellikle, burun tıkanıklığını giderici veya damar daraltıcı ilaçları kullanamayan hamile kadınlara önerilir.

Alerjiler: Alerjik rinit durumunda, alerjik reaksiyona sebep olan partikülleri yok ederek, mukozayı lokal ilaçların uygulanmasına hazırlar.

- Olumsuz havalandırma, aşırı ısıtma, uçakla yolculuk gibi etki-lerle kuruluk oluşması durumunda, burnun nemlendirilmesi
- Doğru işlevini muhafaza etmek için burun deliklerinin günlük temizliği

3. Otribebe Monodoz nasıl kullanılır?

Doğal deniz suyu olduğundan Otribebe, istenen sıklıkta ve gerek duyulacak süre boyunca kullanılabilir.

Otribebe Monodoz, bebeklerde doğdukları ilk günden itibaren kullanılabilir.

Burun tıkanıklığını gidermede yardımcı olarak, temizlik ve nemlendirmede kullanımı:

Bebek, çocuk ve erişkinlerde normal kullanım dozu, günde, her bir burun deliğine 4 uygulamadır. Bir tek dozluk ürünle her bir burun deliğine uygulama yapılır.

- Gerekirse burun temizlenir. Bir tek kullanımlık flakon ayrılır ve plastik kapağı açılır.
- Baş, arkaya kadar çekilip flakon burun deliğinden içeri sokulur.
- Tek bir damla akıtmak için flakona dikkatle basılır, ancak daha derinlemesine bir temizlik gerekiyorsa daha güçlü şekilde basılır. Bu işlem diğer burun deliği için de tekrarlanır.

Bebeklerde kullanım şekli:



- Bebek sırt üstü yatırılır, başı bir tarafa doğru çevrilerek ürün yukarıya bakan burun deliğine uygulanır.
- Başı aksi yöne çevrilerek, aynı işlem diğer burun deliğine de uygulanır.
- Birkaç saniye sonra, mukozaların boşalabilmesi için bebek kaldırılır.

Hijyen açısından her bir flakon, tek bir kişi tarafından kullanılmalıdır.

Tek kullanımlık flakonu bir kez açtıktan sonra, herhangi bir enfeksiyon riskini önlemek için tekrar kullanmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Doğru kullanıldığı takdirde, Otribebe Monodoz ürününün herhangi bir yan etkisine rastlanmamıştır.

5. Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Otribebe Monodoz, izotonik deniz suyuna aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde kullanılmamalıdır.

Otribebe Monodoz, belirtilen kullanım amaçları doğrultusunda uygulandığında özel önlemlerin alınması gerekli değildir.

Otribebe Monodoz, temizleme özelliği nedeniyle, herhangi bir başka burna uygulanan ürün (örneğin, soğuk algınlığı ya da burun allerjisi olanlarda) kullanılmadan önce, ilk olarak uygulanmalıdır.

Otribebe Monodoz, hamilelik ve emzirme süresince kullanılabilir.

Enjekte edilmez.

6. Otribebe Monodoz'un saklanması

Etiketinin veya ambalajının üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra Otribebe Monodoz'u kullanmayınız.

Otribebe Monodoz'u, çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

 LABORATOIRE DE LA MER, ZAC de la Madeleine, Avenue du General Patton 35400 SAINT MALO, FRANSA.

Fransa'da üretilmiştir.


İthalatçı firma:

GlaxoSmithKline Tüketici Sağlığı A.Ş.
Büyükdere Cad.No:173 1.Levent
Plaza B Blok 34394 Levent-Şişli/ İstanbul
Soru ve görüşmeleriniz için: 444 4 083 – tuketicisagligi@gsk.com

STERILE A

CE 0459

TR 940159
CNOT1066 – IG 246374

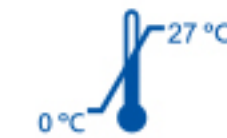

Tıbbi Cihaz

